

CLASSIC-CHECK™ REVISIÓN DE SERVICIO

INSTALACIÓN APROPIADA DEL SISTEMA CLASSIC-CHECK™, USADO EN UNA CAMA CON LA COLCHONETA SENSORMAT®

(Consulte también el manual del usuario Classic-Check para cambios de instalación)



A. Saque el Sensormat® de la bolsa de plástico. Ponga una banda elástica con clip y engánchela a cada extremo del Sensormat®. Este paso importante mantendrá el Sensormat® en la posición correcta sobre el colchón, para asegurar su estabilidad. El Sensormat® funcionará con cualquier lado hacia arriba.



B. Asegúrese de que todas las sábanas y ropa de cama estén recogidas hasta los pies de la cama. Ponga el Sensormat® de 3 a 5 pulgadas por debajo del borde del colchón.



C. Enganche los clips en la tela del colchón, borde del colchón, o los resortes de la cama a ambos lados. Ahora puede acomodar de nuevo las sábanas y ropa de cama. Anote en la etiqueta del cordón, la fecha en que comenzó a usar el Sensormat®.



D. Conecte el Sensormat® en la unidad de control de Classic-Check™. **IMPORTANTE:** Use solamente Sensormat® manufacturado por Bed-Check® con la unidad de control Classic-Check™.



E. Enchufe la unidad Classic-Check™.



F. Si será conectado con el sistema de llamados de enfermera (opcional), conecte el cordón de llamados de enfermera, directamente en el punto de contacto de llamados de enfermera de la institución.



G. Para asegurarse de que esta unidad esté fuera del alcance del paciente/residente, fije la unidad de control Classic-Check™ al marco de la cama, utilizando la cinta Velcro®, o a la cabecera de la cama, usando una funda opcional de alambre.



H. Ayude al paciente/residente a acostarse en la cama. La unidad de control se activará automáticamente. La luz amarilla de Pausa contará regresivamente 5 segundos y sonará un tono una vez, a medida que la luz verde del monitor se enciende. Usted puede saltarse los 5 segundos oprimiendo el botón de Reprogramación una vez.



I. Cuando el paciente/residente intente bajarse de la cama, una alarma sonará en el cuarto y en la estación de enfermeras, si ha sido conectada como en el paso F de arriba. Presione el botón de Reprogramación una vez para cancelar la alarma. Asegúrese de Reprogramar la estación de llamadas a la enfermera en el cuarto del paciente/residente.

J. Para bajar al paciente de la cama, presione el botón de Reprogramación. La unidad entrará en el Modo de Espera por 25 segundos (la luz amarilla parpadeará). A los 25 segundos sin nada de peso, en el Sensormat®, la unidad comenzará el modo de Espera permanente (luz amarilla constante).



K. Si a los 25 segundos el paciente sigue encima de la colchoneta Sensormat®, Classic-Check™ comenzará a vigilar otra vez (luz verde constante). **PAUSA PERMANENTE o MONITOR:** Siempre que haya peso en el Sensormat®, usted puede cambiar el modo rápidamente, de Monitor a Pausa, o de Pausa a Monitor, solo presionando el botón de Reprogramación. **Asegúrese siempre de que la luz verde del monitor esté prendida, antes de dejar al paciente/residente solo.**



P.O. Box 80238, Lincoln, NE 68501 • 1-800-523-7956 • 1-918-592-3338 • www.bedcheck.com

IMPORTANTE: Revise la efectividad del sistema diariamente y/o al cambio de turno. Asegúrese siempre de que el Sensormat®, esté en la posición correcta, cada vez que suene una alarma. Use únicamente los productos Bed-Check® para mantener la garantía y la compatibilidad del sistema. Las características físicas, los hábitos y factores que ponen a los pacientes en riesgo de caídas varían y pueden cambiar día a día. Por favor analice estos factores cuando sea necesario.